

## Инструкция по запуску исследования в программе OnDemand

### CD диск

1. Откройте диск с исследованием
2. Запустите файл  
[OnDemand3DCommunicator.exe](#)
3. [Дождитесь импорта файлов \(5-7 мин\)](#)

### Яндекс.Диск

1. Перейдите по предоставленной в письме [ссылке](#)
2. Сохраните файлы на рабочем столе компьютера или в удобной папке, [разархивируйте](#) файл в одноименный
3. Зайдите в папку и запустите файл  
[OnDemand3DCommunicator.exe](#)

4. Запустите установку (если программа не установлена) и дождитесь запуска [OnDemand3D](#) (в случае, если программа автоматически не запустилась, сделайте это вручную, дважды кликнув по ярлыку, появившемуся на рабочем столе)
5. В открывшемся окне программы в разделе [«Основная база данных»](#) дважды кликните по ФИО пациента
6. Двойным кликом запустите [проект](#) (цветные кубики, имя файла из четырех цифр) интересующего исследования
7. Подтвердите кликом по кнопке [«ОТКРЫТЬ»](#)